



Woman secret

Jednokrokový prúžkový ovulačný test 20v1

Určené na samodiagnostiku

„Right time“

Jednokrokový LH - močový ovulačný test je rýchly a jednoducho použiteľný. Je to kvalitný test, ktorý dokáže predpovedať, kedy máte LH (luteinizačný hormón) zvýšený a každodenným použitím ovulačného testu ľahko zistíte, kedy sa blížite k ovulácii. Nárast LH signalizuje, že k ovulácii môže dôjsť v najbližších 24 až 48 hodin. Ak budete mať pohlavný styk počas týchto 24-48 hodín po zistení nárastu LH hormónu, Vaše šance na otehotnenie sa budú maximalizovať. Woman secret „Right time“ Vám pomôže denne sledovať Vašu ovuláciu a plodnosť.

Kedy začať s testom?

Nižšie uvedená tabuľka Vám pomôže určiť, kedy by ste mali začať s testovaním. Testovanie opakujte každý deň, až pokým test bude indikovať, že ovuláciu budete mať nasledujúcich 24-48 hodín. Ak chcete otehotnieť je najlepší čas mať pohlavný styk v tomto časovom rozmedzí.

Dĺžka cyklu	Začiatok testovania
< 35 dní	Deň po skončení menštruačného cyklu
≥35 dní	Tri dni po skončení menštruačného cyklu

Vzorky moču:

1. Nepoužívajte vzorky moču odobraté zavčasu ráno, nakoľko ranný moč neobsahuje dostatok LH. Nedosiahli by ste správny výsledok.
2. Na testovanie je najlepšie použiť moč odobraný medzi 10. - 20. hodinou.
3. Používajte moč odobraný približne v rovnakom čase každého dňa testovania.
4. Znížte príjem tekutín 2 hodiny pred odberom vzorky moču, nakoľko môže dôjsť k zníženiu koncentrácie LH v moči.

Testovací postup:

1. Pred testovaním dbajte na to, aby ovulačný test a vzorka moču mali izbovú teplotu (18 - 30°).
2. Do čistej a suchej nádoby odoberte vzorku moču.
3. Testovací prúžok vyberte z ochranného obalu a uchopte ho za farebnú časť. Opačnej strany sa nedotýkajte, aby nedošlo ku skresleniu výsledku testu.
4. Testovací prúžok ponorte na 10 sekúnd do nádoby so vzorkou moču, ale len po vyznačenú časť (←MAX).
5. Položte ho na podložku (nie na savý papier!) a počkajte, kým sa objavia farebné čiarky. V závislosti od koncentrácie LH sa môže pozitívny výsledok objaviť do 40 sekúnd. Avšak na potvrdenie negatívneho výsledku počkajte na reakciu 10 minút. Nikdy nezisťujte výsledok testu po dlhšej dobe ako 30 minút od aplikácie vzorky moču.



Vyhodnotenie výsledku testu

Negatívny:

Ak sa v testovacej časti objaví len jedna čiarka, prípadne sa objaví druhá čiarka, avšak výrazne bledšia, test je negatívny.




Pozitívny:

Ak sú v testovacej časti rovnako viditeľné obidve čiarky, prípadne jedna čiarka je rovnaká alebo tmavšia ako druhá čiarka, ovuláciu budete mať pravdepodobne nasledujúcich 24 - 48 hodín. Ak chcete otehotnieť, je najlepší čas mať pohlavný styk pred uplynutím 48 hodín.



Chybny:

Ak sa v testovacej časti neobjaví žiadna čiarka, test bol vykonaný chybné. Test opakujte len s novým prúžkom.

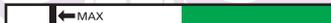

Testovacia súprava obsahuje:

1. Testovací prúžok - 20 ks
2. Návod na použitie
3. Sušidlo - látka proti navlhnutiu (Nepoužíva sa!)

Skladovanie

Testovaciu súpravu skladujte pri teplote 2° - 30°C v utesnenom obale do dátumu expirácie. Testovacia súprava by mala byť chránená pred slnečným žiarením, vlhkom a teplom.

Upozornenie

Výsledky testu majú informatívny charakter.

Výrobca a distribútor:



IMPERIAL VITAMINS

Imperial VITAMINS, s.r.o.

Horná 13 ,038 61 Vrútky

Slovensko

tel.: 043/4001082, fax: 043/4001084

e-mail: womansecret@womansecret.sk

web: www.tehotensketesty.sk, www.imperialvitamins.sk

V predaji aj ďalšie testy z rady „Woman secret“

Woman secret „BABY“

Jednokrokový HCG tehotenský test

CE 1023 P81307

Vydanie 23/10/2012
Revízia 14/02/2017